

Urisys 1100[®]

Hurtigveiledning

Lese av urinteststrimler



- 1** Bruke Combur¹⁰Test UX-teststrimler. Combur¹⁰Test UX-teststrimler er merket som Chemstrip 10 A teststrimler i Canada.

Dypp teststrimmelen kort (1 sek) i urinprøven. Trekk den lange kanten av strimmelen langs kanten på prøvebeholderen for å fjerne overskytende urin.



Ikke bøy teststrimmelen!



- 2** Legg teststrimmelen på teststrimmelholderen med putene vendt oppover. Enden på teststrimmelen må skyves så langt som mulig under klipsen. Omtrent 2 mm av strimmelen må holdes under klipsen.



- 3** Trykk på START-knappen*. Etter det bekreftende pipet lukkes metall-pinnen. Kontroller at teststrimmelen er riktig plassert i hakket på teststrimmelholderen.

* Operatør-ID må angis hvis denne funksjonen er aktivert.



- 4** Trykk eventuelt teststrimmelen manuelt til riktig posisjon.

Det er **viktig** at teststrimmelen er **riktig plassert** og at det trykkes på START-knappen **5–10 sekunder etter at strimmelen er dypet**.



- 5** Fjern og kast den brukte teststrimmelen når målingen er fullført. Tørk av urinrester med en lofri klut.

Se brukerhåndboken hvis du ønsker flere instruksjoner.

Kalibrere Urisys 1100-systemet



Vær oppmerksom på: En kalibrering med Control-Test M er bare nødvendig hvis du har tenkt å bruke Combur¹⁰Test UX-teststrimler med Urisys 1100-systemet.

Kalibrer hver 7. dag eller når meldingen «REPEAT CALIBRATION» vises på displayet.

- 1 Hvis meldingen «REPEAT CALIBRATION» vises, trykker du på venstre funksjonstast «YES». Meldingen «START CALIBRATION» vises.

Hvis Urisys 1100-analysatoren er i Ready-to-Measure-modus, trykker du på venstre funksjonstast for å velge «Calibr.». Meldingen «START CALIBRATION» vises.

- 2 Legg kalibreringsstrimmelen på teststrimmelholderen med putene vendt oppover. Omtrent 2 mm av strimmelen må holdes under klipsen.

- 3 Trykk på START-knappen.

- 4 Hvis kalibreringen er gyldig, skrives meldingen «CALIBRATION OK» ut.

- 5 Hvis en av følgende meldinger vises på displayet, kan du se i brukerhåndboken for ytterligere handlinger:

- «REFERENCE PAD ERROR!»
- «CALIBRATION INVALID!»
- «CALIBRATION ERROR!»

Daglig vedlikehold



Rengjør teststrimmelholderen med vann og desinfeksjonsmiddel én gang daglig.

- 1 Slå av instrumentet.
- 2 Trekk teststrimmelholderen ut av instrumentet.
- 3 Skyll med rennende vann.
- 4 Fjern krystallinavleiringer, særlig på metallpinnemekanismen eller på tennene på undersiden av teststrimmelholderen med en myk børste.

- 5 Tørk av teststrimmelholderen med en løsning bestående av 70 % alkohol eller annet egnet desinfeksjonsmiddel. Tørk av med en tørr, løfri klut.
- 6 Sett teststrimmelholderen på plass.
- 7 Slå på instrumentet.

Bytte skriverpapir



- 1 Åpne skriverdekselet ved å trykke på det strukturerte området rett under dekkelet, og ta ut den gamle papirrullen.
- 2 Sett inn den nye rullen med skriverpapir, rull ut fra undersiden, og trekk papiret fremover langs kanten av papirsporet.

- 3 Lukk dekkelet igjen ved å trykke på det til du hører at det låses på plass. Sørg for at papiret går gjennom papirsporet.


Vær oppmerksom på: Når du vil ta ut rapportutskriften, skal du dra papiret fram og rive det av over kanten.

Teknisk service

Hvis du har spørsmål etter å ha lest håndboken, eller hvis du trenger teknisk assistanse, kan du kontakte din lokale Roche Diagnostics-organisasjon.

COBAS, URISYS, URISYS 1100, COMBUR-TEST and CHEMSTRIP are Trademarks of Roche.

© 2021 Roche Diagnostics

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
Germany
Made in Hungary

www.roche.com
https://diagnostics.roche.com

