

Utføre glukosemåling med Accu-Chek Performa


1. Sett inn en teststrimmel,
instrumentet slås på automatisk



2. Sjekk at kodennummeret stemmer
med nummeret på
strimmelboksen



3. Påfør en bloddråpe

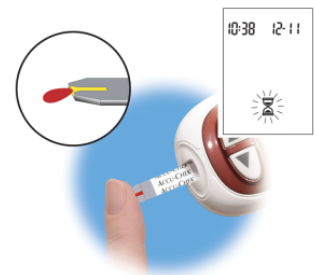

4. Les av resultatet etter 5 sek



OBS! OBS! OBS!

Husk å skifte kode-chip hver gang en ny boks med strimler åpnes. Strimler utgått på dato viser E-5 i displayet.

Utføre intern kvalitetskontroll på Accu-Chek Performa

1. Sett inn en teststrimmel
Instrumentet slås på automatisk




2. Sjekk at kodenummeret stemmer
Med nummeret på strimmelboksen



3. Velg kontroll level 1 eller 2



4. La apparatet ligge på et bord, mens flasken med kontrollvæske føres bort til strimmelen. Timeglasset vises mens kontrollen analyseres

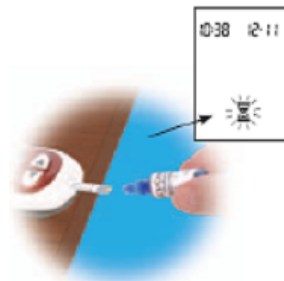

5. Resultatet vises på skjermen



6. Noter resultatet på skjema som oppbevares bakerst i glukosepermen