

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssykehus	<h2 style="margin: 0;">CADD- og Micrel-pumper; hente, registrere, lån og utlån</h2>	
Kategori: Pasientbehandling/Fagprosedyrer/Annet/Annet 3	Gyldig fra/til: 09.10.2023/09.04.2025	
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Kliniske støttefunksjoner	Versjon: 6.00	
Godkjenner: Pål Oscar Eidsheim	Informasjon	
Dok. ansvarlig: legernes, kirsti	Dok.id: D28749	

CADD Legacy-pumper benyttes hovedsakelig til epidural infusjon og til subkutan- og intravenøs PCA (pasientkontrollert analgesi).

- Den skal ha veske, nøkkel og kort brukerveiledning

Micrel MP mlh+ -pumper benyttes til subkutan infusjon

- Den skal ha veske og kort brukerveiledning. Batteriene i Micrel skiftes når pumpen melder fra.

3 ulike områder for bruk av pumpene:

- 1) **Til inneliggende pasienter** på Haukeland universitetssykehus benyttes pumper med **rød registreringsetikett** fra MTA
- 2) **Til transport av pasient til annet sykehus:** Micrel utlånspumpe med **gul merketape** med teksten «Kun ved transport til annet sykehus». Disse bestilles fra Drift/teknisk kundesenter på **tlf. 77100**.
- 3) **Til hjemmebehandling og på sykehjem** benyttes pumper med **grønn registreringsetikett** – disse tilhører Seksjon for behandlingshjelpemidler

Ad. pkt. 1, inneliggende pasienter:

a) Hente pumper: Hos Postoperativ seksjon, Sentralblokken 1. etasje – følg blå linje i gulvet mot Postopr. seksjon: Når du svinger mot høyre og passerer en åpen glassdør: på høyre side står et lavt skap med foto av pumpene på utsiden. Evt. kan henting bestilles via PorterCom.

NB! Alle som henter pumper fra lager har ansvar for å registrere skjema i permene - én perm for CADD og én perm for Micrel:

- **notèr nummer på pumpen og avdeling/post som pasienten skal til**

b) Rengjøre pumper: Skal utføres av sengeposten der pasienten ligger. Vesken rengjøres etter hver bruk i instrumentvaskemaskin/dekontaminator. Pumpene rengjøres med Virkon.

c) Returnere pumper: Posten har ansvar for å påse at pumpe og veske returneres - begge deler legges i egen kasse for retur.

Pass på å klippe av slangen til kassetten før pumpen returneres. →



Forsyningsportørene har ansvar for å samle inn pumper og sende disse i container til terminal 85.

Portør ved Verkstedbygg har ansvar for å bringe pumpene til Drift/teknisk kundesenter, samt å hente ferdig registrerte pumper for retur til Postoperativ.

Portør ved Postoperativ har ansvar for daglig å registrere informasjonen inn i Merida Medisinsk Teknisk utlånsmodul. Portøren melder til Drift/teknisk kundesenter dersom det er for få pumper (færre enn 10).

Drift/teknisk kundesenter har ansvar for å registrere retur av pumper i Merida Medisinsk Teknisk utlånsmodul, samt purre på avdelinger som låner pumper ut over en uke.

Batteribytte: Drift/teknisk kundesenter vil fra 01/2023 bytte batterier **kun** hvis pumpen varsler om «lavt batteri» når den kommer til Drift/teknisk. Brukerne må derfor regne med at pumpen vil alarmere om «lavt batteri» under bruk, og må

kunne å skifte batterier i pumpen. Alle brukeravdelinger må ha AA-batterier på lager.

NB! Pumpen må være stoppet før man skifter batterier.

Følg metode for batteriskift i Cadd Legacy i Bruksanvisningen, side 11-15:

<https://handbok.helse-bergen.no/docs/dok/DOK31863.pdf>

Medisinsk-teknisk avdeling har ansvar for å reparere pumper og bestille deler.