

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	Vedlikehold av kunnskapsnivå for Micrel MP ml+ subcutan smertepumpe	
	Kategori: Forskning, innovasjon og utdanning/Utdanning og kompetanse	Gyldig fra/til: 09.06.2022/09.06.2024
	Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Kliniske støttefunksjoner	Versjon: 2.04
	Godkjenner: Klementsens, Beate	Skjema
Dok. ansvarlig: Bjørg Vikås	Dok.id: D28793	

Vedlikehold av kunnskapsnivå for elektromedisinsk utstyr: Micrel MP ml+ subcutan smertepumpe

Kravlisten er utarbeidet av: Bjørg Vikås, KSK, Haukeland Universitetssykehus

Listen er godkjent av:	Dato:	For avd:
Fått grunnopplæring v/ firma eller fagsykepleier?	ja / nei	Skjema er besvart dato:

Kunnskapskrav:	Kan / forstår	Har sjekket i Bruksanv.	Trenger opplæring
• Korrekt rengjøring; se bruksanvisning og avdelingens rutine			
• Kjenner til hvor du bestiller/får tak i pumpe			
• Kjenner til aktuell sprøytetype, med luer-lock (standard er 10 ml sprøyte)			
• Kan plassere sprøyten korrekt i pumpen (med propp på, uten å koble til infusjonsslangen – for å unngå søl og «svinn» av medikamentet)			
• Kan å taste inn korrekt sprøytetype og aktuell sprøytetørrelse			
• Kan å prime via pumpen: for å fjerne «slark» mellom sprøytetempelet og pumpen, samt for å fylle settet (følg bruksanvisningen helt nøyaktig)			
• Kan å stille inn rett hastighet			
• Kan å starte infusjon («cal» må vises i displayet)			
• Kan å endre hastighet under pågående infusjon («cal» må vises i displayet)			
• Kjenner til ulike alarmer			
• Kan sjekke i displayet om infusjon pågår			
• Kan å stoppe/slå av pumpen			
• Kan å bytte batterier – husk at pumpen da må være avslått			