











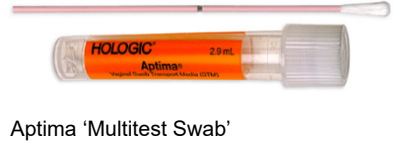
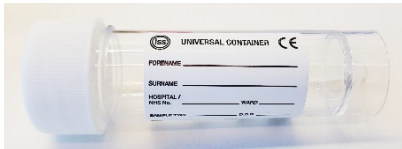






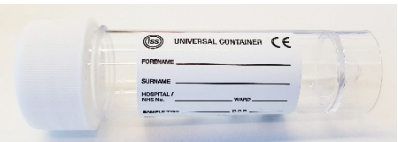


Undersøking	Prøve	Prøvetakingsutstyr
PCR undersøking, luftvegar:		
<u>Luftvegspakke:</u> Luftvegspatogene virus og bakteriar <i>For pakkeinnhald sjå analyseoversikten.no</i>	Sekret frå hals og/eller nasofarynks	 <p>Sigma VCM (raud kork). Leverast med tynn eller tjukk pensel: Hals (tjukk pensel), nasofarynks (tynn pensel)</p>
	Sekret frå nedre luftvegar	 <p>Glas utan tilsetjing (kvit kork)</p>
SARS-CoV-2	Sekret frå hals og/eller nasofarynks	<p><u>Ein kan motta eit av desse media frå laboratoriet for prøvetaking:</u></p>  <p>Sigma VCM (raud kork): Leverast med tynn eller tjukk pensel: Hals (tjukk pensel), nasofarynks (tynn pensel)</p>  <p>REST CTM (raud kork): Leverast med tynn og tjukk pensel: Hals (tjukk pensel), nasofarynks (tynn pensel)</p>  <p>Copan UTM-RT MINI (raud kork): Nasofarynks (tynn pensel)</p>  <p>Aptima Multitest Swab (orange etikett, blank kork med folie på toppen): Hals (tjukk pensel)</p>  <p>Direct Load Capture Cap (Lilla kork): Hals (tjukk pensel)</p>

Undersøking	Prøve	Prøvetakingsutstyr
	Sekret frå nedre luftvegar	 <p>Glas utan tilsetjing (kvit kork)</p>
Legionella pneumophila	Sekret frå nedre luftvegar	 <p>Glas utan tilsetjing (kvit kork)</p>
Pneumocystis jirovecii		
PCR undersøkning, virus:		
Herpes-, entero-, varicella zoster- og adenovirus	Sekret frå blemmer, sår, auge og liknande	 <p>Virus transportmedium (raud kork) Tjukk pensel</p>
PCR undersøkning, seksuelt overførbare sjukdommar:		
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium NB: Kan ikkje nyttast til resistensbestemming av gonokokkar	Urin	 <p>Aptima 'urine collection kit'</p>
	<u>Sekret frå:</u> Cervix Urethra	 <p>Aptima 'Unisex Swab'</p>
	<u>Sekret frå:</u> Vagina Anus Hals Penismunning/glans Sekret frå auge (nyfødd)	 <p>Aptima 'Multitest Swab'</p>

Undersøking	Prøve	Prøvetakingsutstyr
PCR undersøkning, sopp:		
Dermatofyttar	Hud, hår og negler	 <p>Glas utan tilsetjing (kvit kork)</p>
PCR undersøkning, feces:		
<p><u>Fecespakke:</u> Tarmpatogene bakteriar, virus og parasittar <i>For pakkeinnhald sjå analyseoversikten.no</i></p>	Avføring	 <p>Σ-Fecal Transwab (blå kork)</p>
Clostridium difficile toksin		
Helicobacter pylori antigen		
Andre analysar, feces:		
<p>Utvida parasittundersøking v/PCR som dekker eit breitt utval av tarmparasittar.</p> <p>Ved behov utførast også mikroskopi av konsentrert prøvemateriale.</p>	Avføring	 <p>Glas utan tilsetjing (blå kork)</p>

Undersøking	Prøve	Prøvetakingsutstyr
Prøvar til bakteriologisk dyrking:		
Screening for resistente mikrobar (MRSA, VRE, ESBL)	Puss/abscessinnhold, sårsekret, kropps/vevsvæsker, sekret frå hud og slimhinner	 eSwab (kvit kork)
Urinvegspatogene bakteriar	Urin, tilsendte prøvar	 Urin – Borsyre (grøn kork)
	Urin, inneliggjande pasientar <u>OBS:</u> Urin haldbar 4 timar i romtemperatur	 Urin – utan tilsetjing (gul kork)
Patogene bakteriar og soppar	Puss/abscessinnhold, sårsekret, kropps-/vevsvæsker, sekret frå hud og slimhinner	 eSwab (kvit kork)
	Puss/ abscessinnhold, vevsbitar, kropps-/vevsvæsker og liknande	 Glas utan tilsetjing (kvit kork)

For ytterlegare informasjon sjå www.analyseoversikten.no