


| | | |
|--|---|----------------|
|  | Bruerveileder: Urisys 1100 (med blå knapp) som overfører pasientresultater elektronisk | |
| | Bruerveiledning | Dok.ID: D76701 |
| Organisatorisk plassering: Kliniske støttefunksjoner | Versjon: 1.01/07.04.2025 | |
| Kategori: Kliniske støttefunksjoner/Laboratorieundersøkelser | Gyldig til: 07.04.2029 | |
| Dok. eier: Børø, Ingunn | Dok. ansvarlig: Anne Gro Tyse | |

Formål

Beskrive fremgangsmåte for å få overført pasientresultater elektronisk fra Urisys 1100 (med blå knapp) via MOXA boks, når prøvene analyseres pasientnært på fødselsnummer.

Målgruppe

Helsepersonell som har fått opplæring i bruk av Urisys 1100 (med blå knapp).

Distribusjon

Prosedyren finnes i papirutskrift ved alle pasientnære Urisys 1100 (med blå knapp) som overfører pasientresultater elektronisk.

Endringer i denne versjonen:

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

| Versjon | Endring i denne versjonen |
|---------|---|
| 1.01 | Endret navn for å kunne skille to ulike modeller av Urisys 1100. Oppdatert prosedyren med tilsvarende navneendring. Forlenget gyldighet til 48 måneder (samsvarende med hurtigveileder) 07.04.2025 camorm Forlenget gyldighet til 07.04.2029 |

Fremgangsmåte

For bruk av Urisys 1100 (med blå knapp) henvises det til [Hurtigveileder Cobas Urisys 1100 \(med blå knapp\)](#), her beskrives daglig vedlikehold, skifte av papirrull og avlesning av urinstrimler.

For at pasientsvar skal overføres elektronisk må de neste punktene følges i riktig rekkefølge. Dersom prosedyren ikke utføres i riktig rekkefølge vil pasientens ID henge igjen på displayet, og det er fare for at neste pasientprøve blir analysert på feil pasient ID. For å fjerne pasient ID fra displayet må instrumentet slåes av og på ved hjelp av hovedbryteren bakpå instrumentet.

- Er instrumentet i dvalemodus, trykk på den blå startknappen en gang for å klargjøre instrumentet for analysering
- **Må gjøres først:** skann riktig pasient ID (fødselsnummer) med barkodeleseren
- Kontroller at riktig pasient ID blinker på displayet
- Bland prøven, dypp strimmel og stryk av overskytende urin mot kanten av prøverøret (se hurtigveileder)
- Plasser prøven på innmatingsbrettet og trykk på blå startknapp
- Resultatet blir skrevet ut etter 45 sekunder, samtidig som det overføres til DIPS
- Kontroller at riktig pasient ID står på utskriften, og at det ikke lenger blinker pasient ID på displayet

Referanser

Interne referanser

[1.7.2-04](#)

[Hurtigveileder Cobas Urisys 1100 \(med blå knapp\)](#)

Eksterne referanser

