

Valg av prøverør dersom pasienten har vandig avføring/diare

Svært vassen avføring som ikkje festar seg til prøvepinnen vil kunne gi falsk lav svar.


Prøve for iFOB bør derfor ikkje tas dersom pasienten har diare.

	Normal avføring	Vandig avføring (diare)
Kalprotektin	Bruk OC-rør som vanlig etter instruks	Prøve kan sendes inn på tørt prøverør (laboratoriet vil da pipettere over prøvematerialet for analysering)
iFOB	Bruk OC-rør som vanlig etter instruks	Pasient må vente med å ta prøve til når man ikke har vandig avføring/diare. I tilfeller der pasienten har kronisk vedvarende vassen avføring som ikkje festar seg til prøvepinnen, vil en kunne benytte <u>hemofec</u>. Det er dog viktig å være klar over at hemofec har lavere sensitivitet for okkult blod enn iFOB, og medfører en rekke kostholdsrestriksjonar som det er viktig å være klar over.

Nytt prøverør = OC Sensor
sampling rør



Gammelt prøverør = Tørt rør med blå kork og skei

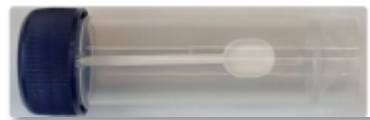

Bestilling av prøverør gjøres fra bestillingssiden ved www.analyseoversikten.no ([lenke, trykk her](#))