

Det må stå
Klar

Parameterlinje
Du får kun resultat på
analyser som er **grønne**

Trafikklys
Grønt: Alt ok
Gult OBS
Rødt: Tilsyn påkrevet

The screenshot shows the ABL 825 FLEXQ interface. At the top, there's a status bar with 'Klar' and a traffic light icon. Below it, a row of parameter status indicators (pH, pCO₂, pO₂, Hb, sO₂, O₂Hb, MetHb, COHb, Hct, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Glu, Lac) is shown. The main display area has a large 'ABL825 FLEX' logo and a 'FLEXQ' label. Below this, a 'Behandlingstid for ny prøve: 00:01:20' is shown. A table with 4 columns (Slot #, Etternavn, Tid til Resultat, Status) contains 3 rows of test results. The first row shows 'Toft' with 'Fullført: OK'. Below the table is a 'MIO' section. At the bottom, there are buttons for 'Meny', 'Logg ut Intern støtte', 'Opplæring', and a clock showing 'Ekstern 11:20'.

Trykk **Logg ut**
når du er ferdig

Opplæring – korte filmsnutter
f.eks. bytte av avfallsbeholder eller papirrull

Gult trafikklys:

Trykk på trafikklyset og sjekk om det lyser på reagenser. Lyser det pga lav renseløsning eller fullt avfall, skift det.

Rødt trafikklys:

- Ved melding «**Feil ved rensing**»: Sjekk om renseløsning er tom og evt skift denne.
- Er instrumentet i «Standby» pga full avfallsbeholder, skift denne. Deretter trykk «ut av standby».
- Dersom en parameter er rød, får man ikke resultatet på denne. Sett på en to-punktskalibrering for å rette opp kalibreringsfeilen.
- Lyser det rødt pga andre feilmeldinger, kontakt laboratoriet.

Dersom behov for kontakt med laboratoriet

HUS-Sentralblokk: 973108
HUS-Glasblokkene: 41701720 (vakttelefon)
Voss: 99204050 (vakttelefon)



Analysering:

Blodgassprøyten eller heparinrøret må være godt blandet

Arterielt:

Sett blodgassprøyten uten luftbobler eller koagel i prøveporten, og trykk **Start**.

Venøs:

-Trykk **Venøs blodgass - 195 µl**
 -Trykk **Start** og vent til nålen har kommet helt ut. Ta av korken på heparinrøret og hold røret slik at blodet blir aspirert inn.

- Skann/ tast inn pasientens fødselsnummer i Pasient ID feltet.
- Legg inn evt FO₂(i) dersom pasienten får oksygen tilførsel.