

Formål

Riktig prøvetaking av vaginalsekret for testing av følgende seksuelt overførbare infeksjoner:

- Chlamydia trachomatis
- Neisseria gonorrhoeae (gonokokker/gonoré)
- Mycoplasma genitalium


Målgruppe

Prøvetaking av anussekret kan gjøres av pasienten selv

Prøvetakingsutstyr

HOLOGIC Aptima® Multitest Swab Specimen Collection Kit

Oversikt: [Prøvetakingsutstyr til mikrobiologisk undersøkning](#)

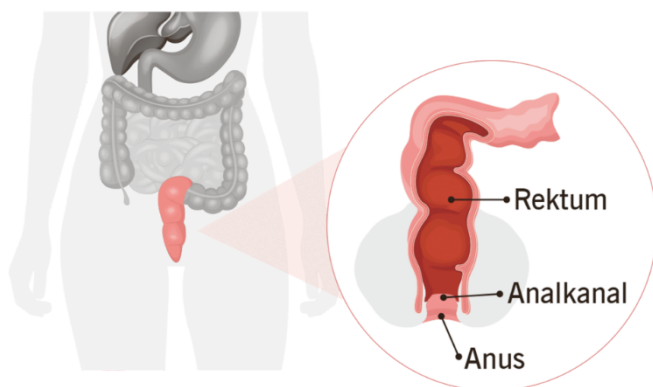


Eksterne referanser


[APTIMA](#)

Praktisk fremgangsmåte for prøvetaking av sekret fra anus


1. Vask hendene – åpne prøvetakingssett **Aptima® Multitest Swab**
2. Klargjør for prøvetaking
OBS: Unngå kontakt med folien på toppen av transportrøret, samt nedre del av prøvetakingspensel

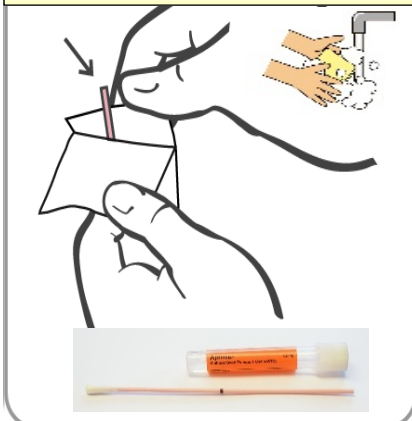


Bruk av prøvetakingspensel i prøvetakingssett:
Hold grepet på/rett over «knekkpunktet» på prøvetakingspensel

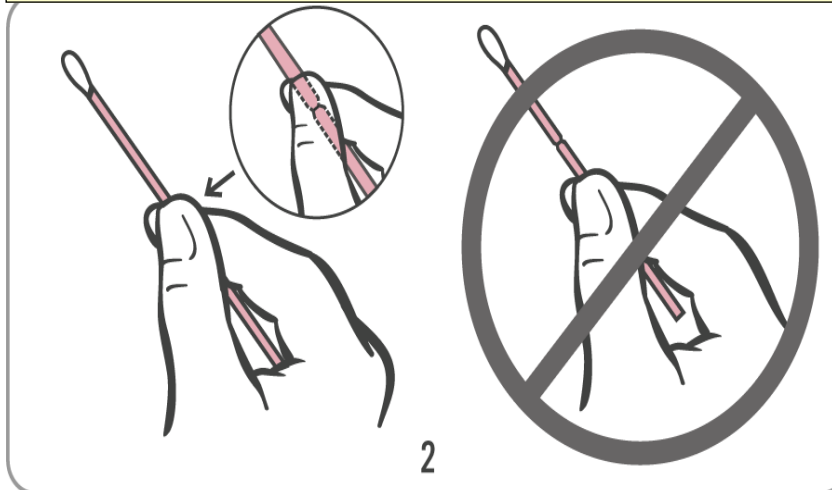



Finn en behagelig, stabil stilling.
Før prøvetakingspenselen inn ca. 3-5 cm i rektum, forbi analåpningen, og roter penselen forsiktig med uret i 5-10 sek. Det skal ikke gjøre vondt. Unngå kontakt med hud når prøvetakingspenselen tas ut

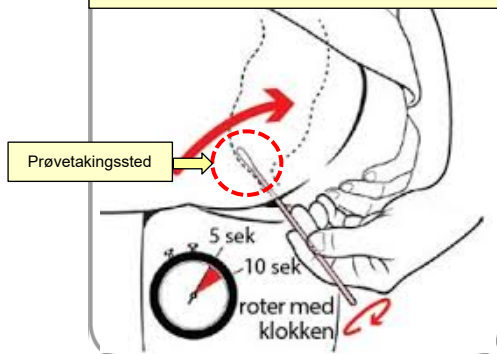


Ta korken av transportrøret, og plasser prøvetakingspenselen helt ned i røret

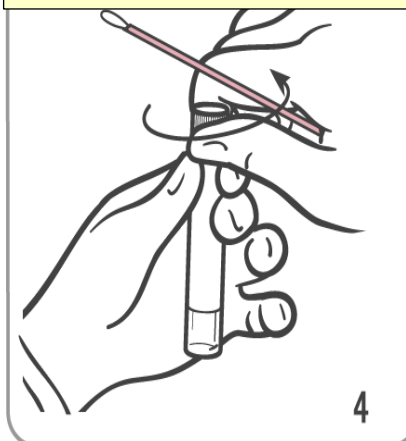


Knekk av prøvetakingspenselen på «knekkpunktet», ved hjelp av kanten på transportrøret

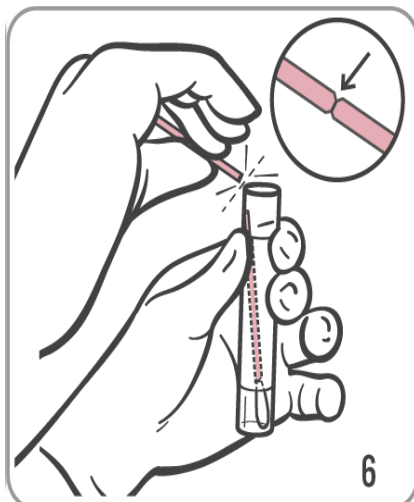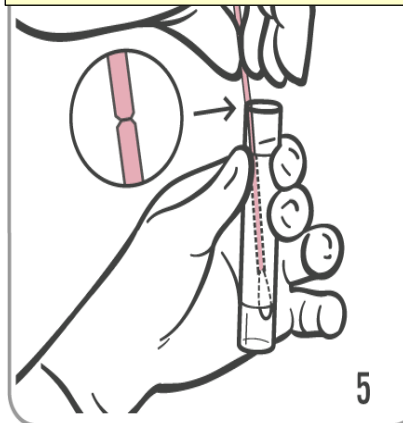

Kast øverste del av prøvetakingspenselen

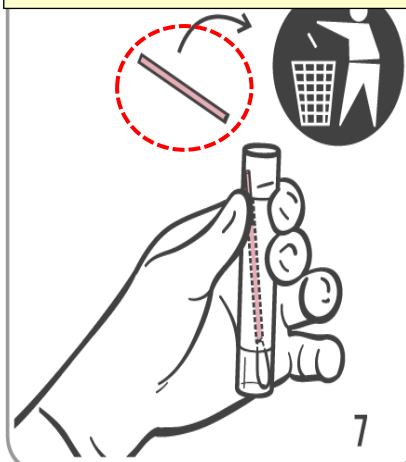

Skru korken godt igjen, unngå kontakt med folien på korken. Prøver med skadet folie kan ikke analyseres

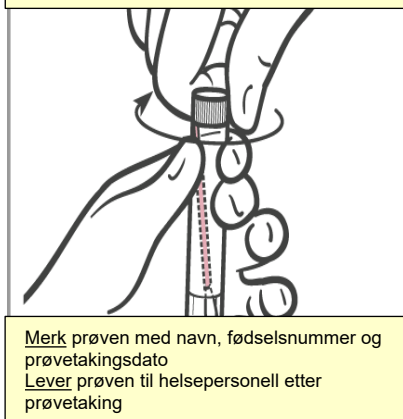

Merk prøven med navn, fødselsnummer og prøvetakingsdato
Lever prøven til helsepersonell etter prøvetaking

OBS:

- Dersom innholdet i røret søles på huden, vask med såpe og vann
- Dersom innholdet i røret spruter inn i øynene, skyll umiddelbart med vann
- Dersom innholdet i røret renner ut, be om et nytt Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit