








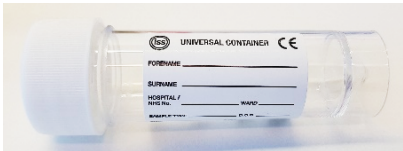







Undersøking	Prøve	Prøvetakingsutstyr
PCR undersøkning, luftvegar:		
<u>Luftvegspakke:</u> Luftvegspatogene virus og bakteriar <i>For pakkeinnhald sjå analyseoversikten.no</i>	Sekret frå hals og/eller nasofarynks	 <p>Sigma VCM (raud kork). Leverast med tynn eller tjukk pensel: Hals (tjukk pensel), nasofarynks (tynn pensel)</p>
	Sekret frå nedre luftvegar	 <p>Glas utan tilsetjing (kvit kork)</p>
SARS-CoV-2	Sekret frå hals og/eller nasofarynks	 <p>Sigma VCM (raud kork): Leverast med tynn eller tjukk pensel: Hals (tjukk pensel), nasofarynks (tynn pensel)</p>
	Sekret frå nedre luftvegar	 <p>Glas utan tilsetjing (kvit kork)</p>
Legionella pneumophila	Sekret frå nedre luftvegar	 <p>Glas utan tilsetjing (kvit kork)</p>
Pneumocystis jirovecii		
PCR undersøkning, virus:		
Herpes-, entero-, varicella zoster- og adenovirus	Sekret frå blemmer, sår, auge og liknande	 <p>Virus transportmedium (raud kork) Tjukk pensel</p>

Undersøking	Prøve	Prøvetakingsutstyr
PCR undersøking, seksuelt overførbare sjukdommar:		
<p>Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae og Mycoplasma genitalium</p> <p><u>NB:</u> Kan ikkje nyttast til resistensbestemming av gonokokkar</p>	<p>Urin</p>	 <p>Aptima 'urine collection kit'</p>
	<p><u>Sekret frå:</u> Cervix Urethra</p>	 <p>Aptima 'Unisex Swab'</p>
	<p><u>Sekret frå:</u> Vagina Anus Hals Penismunning/glans Sekret frå auge (nyfødd)</p>	 <p>Aptima 'Multitest Swab'</p>
PCR undersøking, sopp:		
<p>Dermatofytter</p>	<p>Hud, hår og negler</p>	 <p>Glas utan tilsetjing (kvit kork)</p>

Undersøking	Prøve	Prøvetakingsutstyr
PCR undersøkning, feces:		
<p><u>Fecespakke:</u> Tarmpatogene bakterier, virus og parasittar <i>For pakkeinnhald sjå analyseoversikten.no</i></p>	Avføring	 Σ-Fecal Transwab (blå kork)
Clostridium difficile toksin		
Helicobacter pylori antigen		
Andre analysar, feces:		
<p>Utvida parasittundersøking v/PCR som dekker eit breitt utval av tarmparasittar.</p> <p>Ved behov utførast også mikroskopi av konsentrert prøvemateriale.</p>	Avføring	 Glas utan tilsetjing (blå kork)
Prøvar til bakteriologisk dyrking:		
Screening for resistente mikrobar (MRSA, VRE, ESBL)	Puss/abscessinnhald, sårsekret, kropps/vevsvæsker, sekret frå hud og slimhinner	 eSwab (kvit kork, tykk pensel)
Urinvegspatogene bakteriar	Urin, tilsendte prøvar	 Urin – Borsyre (grøn kork)
	Urin, inneliggjande pasientar <u>OBS:</u> Urin haldbar 4 timar i romtemperatur	 Urin – utan tilsetjing (gul kork)

Undersøking	Prøve	Prøvetakingsutstyr
Patogene bakteriar og soppar	Puss/abscessinnhald, sårsekret, kropps-/vevsvæsker, sekret frå hals, hud og slimhinner	 <p>eSwab (kvit kork, tykk pensel)</p>
	Til sekret m.a. frå uretra, djupe ØNH-prøver og pediatriske prøver	 <p>eSwab (oransje kork, tynn pensel)</p>
	Puss/ abscessinnhald, vevsbitar, kropps-/vevsvæsker og liknande	 <p>Glas utan tilsetjing (kvit kork)</p>

Oversikten gjeld ikkje prøvetakingsutstyr for blodprøvar. Sjå [Analyseoversikten](#) for meir informasjon.