

## 1.1.1. PLASSERING AV SPRØYTEN

Følg punktene 1-4



## 1.1.2. BRUK

Trykk & , og hold tastene nede i 3 sekunder for å slå PÅ pumpen.



Kontroller rett sprøytemerke.

Trykk for å velge sprøytemerke

Trykk for å bekrefte.



Trykk for å velge den sprøytestørrelsen som skal brukes. Trykk .




Stram mekanisk slakk i pumpen / fyll settet ved å holde inne og .



Trykk eller for henholdsvis øke eller minke hastigheten.



Trykk **straks** og hold inne i 3 sekunder til CAL vises for å bekrefte innstillingen og starte infusjonen.

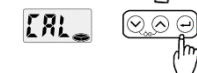

Stoppe infusjonen: Slå AV pumpen: Trykk & og hold inne i 3 sekunder



For å endre hastighet under infusjonen: Sett inn ny hastighet og trykk **straks** helt til CAL vises i skjermen

## 1.1.3. VARSLER

Pumpen i stand by:  
Blinkende tall, start infusjon.



Lavt batterinivå: Trykk en vilkårlig tast for å slå av lyden. Bytt batteri ved neste sprøyteskift.



## 1.1.4. ALARMER

Pumpen vil stoppe ved alarm.



Okklusjon:

Trykk en vilkårlig tast for å slå av lyden.



Feilplassert sprøyte: Trykk en tast for å slå av lyden. Se til at sprøytevingene passer inn i spalten på pumpen og at stempelets runde ende passer i stempeldriverens spor. Se til at festestroppen er stram.



Slutt på infusjon: Slå av pumpen.



Utladet batteri:

Slå av pumpen og bytt alle batteriene.



Teknisk alarm.

Noter koden. Slå pumpen av og på igjen. Ikke bruk pumpen hvis alarmen fortsatt er til stede.



10 ml på 24 timer tilsvarer 00.4 (ml/h)

20 ml på 24 timer tilsvarer 00.8 (ml/h)

For detaljerte instruksjoner, se lokal prosedyre.