

|                                                                                                                                         |                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
|  <b>HELSE BERGEN</b><br>Haukeland universitetssjukehus | <b>Ventiler til infusjonssett, intravenøst og epiduralt</b> |  |
| Kategori: Pasientbehandling/Legemidler/Fagspesifikke retningslinjer                                                                     | Gyldig fra/til: 11.06.2024/11.06.2026                       |  |
| Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Pasientbehandling                                                           | Versjon: 6.00                                               |  |
| Godkjenner: Bjånes, Tormod Karlsen - legemiddelkomiteen                                                                                 | Retningslinje                                               |  |
| Dok. ansvarlig: Arvid Steinar Haugen, fagsjef sykepleiefaglig enhet KSK                                                                 | Dok.id: D37708                                              |  |

### Tilgjengelige ventiler med helt ulik funksjon:



Infuvalve (anti-retur)  
Tilbakeslagsventil



Anti-siphon-ventil  
(mottrykksventil)



SmartSite  
(Nålefri kobling)



MicroClave  
(nålefri kobling)

#### Infuvalve:

Avtale nr. 201186



Tilbakeslagsventil (en-veis ventil) brukes for å hindre at infusjoner går feil vei når to infusjoner er knyttet sammen via en 3-veis kran.

#### Anti-siphonventil:


Avtalenr. 403061



Mottrykksventil som hindrer tendens til luftbobler, og brukes på infusjon av fettløsninger, amiodarone og noen typer cytostatika. Benyttes **kun** på infusjonspumpen Alaris GP neXus, og **aldri** på sprøytepumpene (mottrykket vil bli for stort for sistnevnte).

**SmartSite:**

Avtale nr.: 403061

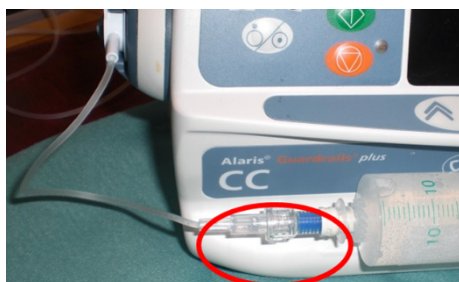

Dette er egentlig en «nålefri» kobling, men brukes oftest som kobling mellom sprøyte og infusjonssett på Alaris PK/CC sprøytepumpe. Hensikten er å hindre luft i infusjonsslangen ved sprøyteskift.

**MicroClave (nålefri kobling):**

Avtale nr. 201209



Nålefri kobling, med og uten forlengesslange (opptil 3 lumen).

Lekkasjefri tilgang til kateteret via koblingen. Koblingen har en ventil som hindrer tilbakestrømming av blod og væske.

Krever nøye desinfeksjon før hver tilkobling/bruk.

**Merk:** 1-løps Hickman-kateter kan ha denne type forlengesslange tilkoblet, og kan da mistolkes som et 2-løps Hickman.

**Desinfeksjonshette (DualCap):**

Avtale nr. 201209

Skal kun benyttes til nålefrie kobling

- Hette med innebygd desinfeksjon (70% sprit)
- Ta ny hette hver gang den tas av
- Urørt hette kan sitte på inntil 7 dager

Interne referanser: [1.2.2.6.1-05 Infusjonssett, ulike typer, skiftefrekvens](#)