

## Formål

Formålet med prosedyren er riktig prøvetaking av urin for testing av følgende seksuelt overførbare sykdommer;

- Chlamydia trachomatis
- Neisseria gonorrhoeae (gonokokker/gonoré)
- Mycoplasma genitalium

## Målgruppe

Prøvetaking av urin kan gjøres av pasienten selv

## Prøvetakingsutstyr

HOLOGIC Aptima® Urine Specimen Collection Kit

## Eksterne referanser

[APTIMA® Urine Specimen Collection Kit for Male and Female Urine Specimens \(hologic.com\)](https://www.hologic.com)

Oversikt: [Prøvetakingsutstyr til mikrobiologisk undersøking](#)

## Praktisk fremgangsmåte for prøvetaking av urin

1. Urinprøve tas minimum 1 time etter siste vannlating. Vask hendene før du begynner. De **første 20-30 ml** urin samles i en ren beholder, **uten** tilsetninger



2. Overfør ca. **2 ml urin** til Aptima® Urin transportrør, innen 24 timer etter prøvetaking. Bruk vedlagt pipette



**NB:**  
Urin fylles opp til mellom de to svarte markeringslinjene på etiketten på Aptima® Urin transportrør for urinprøver



3. Skru korken godt igjen, unngå å ta på folien oppå korken. Prøve med skadet folie kan **ikke** analyseres



4. Lever prøven til helsepersonell etter prøvetaking

**OBS:**

- Dersom innholdet i røret søles på huden, vask med såpe og vann
- Dersom innholdet i røret spruter inn i øynene, skyll umiddelbart med vann
- Dersom innholdet i røret renner ut, be om et nytt Aptima™ Urine Specimen Collection Kit