

Manuell forvask, utføres på undersøkelserom	Manuell lekkasje- testing, utføres på dekontamineringsrom	Manuell rengjøring, utføres på dekontamineringsrom	Automatisk vask desinfeksjonsmaskin utføres på dekontamineringsrom
Rengjør ytre overflate Visuell inspeksjon Sett på utstyr for skylking av ekstrakanal, skyll med minimum 20 ml rengjøringsmiddel og blås deretter gjennom med luft Sett på skylleventil og skyll gjennom alle kanaler med rengjøringsmiddel, minimum 250 ml Fjern overflødig vann fra kanalene ved å kun bruke rød sugeventil Koble endoskopet fra prosessor Sett på vanntett lokk på konnektordelen der dette er påkrevd Legges i lukket beholder merket som kontaminert og transporteres til skyllerom/ dekontamineringsrom Holdes fuktig inntil videre vask og desinfeksjon	Fjern alle løse deler Kast alle engangs løse deler Kast flergangs biopsiventil dersom brukt Koble til og aktiver lekkasjetesteren Senk hele endoskopet i vann uten rengjøringsmiddel Utfør lekkasjetest, med fullstendig vinkling av manøverhjulene Løft konnektordelen opp av vannet Fjern trykket og koble fra lekkasjetesteren Dersom lekkasje følg lokal prosedyre	Vanntemperatur og rengjøringsmiddel etter produsentens anbefalinger Senk hele endoskopet i vann tilsatt rengjøringsmiddel Vask på nytt over innføringslangen med en lofri klut, spesielt over linsen Børst alle tilgjengelige kanaler med egnet rengjøringsbørste Sett på utstyr for skylking av ekstrakanal, og skyll gjennom etter produsentens instruksjoner Sikre at alle kanaler er i kontakt med rengjøringsmiddelet Vask og børst alle flergangs løse deler Skyll endoskopet i separat vask Skyll gjennom ekstrakanal med rent vann, deretter med luft Fjern utstyr for skylking av ekstrakanal Bruk godkjent kurv for tilleggsutstyr	VD skal kun betjenes opplært personale Følg alltid leverandørens anbefalinger ang type vaske- og desinfeksjonsmid Følg leverandørens krav til testing, validering og vedlikehold av maskinen Alle løse deler skal følge det enkelte vaske og desinfeksjons- prosessen VD må kunne gjennomskylle alle kanaler, og ha flowmonitorering hver kanal I den endelige skylleprosessen brukes bakteriefri vann

Interne referanser

[1.2.9.2.2.1-01](#)

[Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr - dekontaminering og lagring](#)